

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V242 Ohřívací kolenní ortéza vibrační masáž 3 režimy

Popis:

Rychle ohřívací elektrický kolenní ortéza:

Zahřeje se během několika sekund, poskytuje ultra pohodlnou horkou terapii pro úlevu od bolestí kolene a rekonvalescenci po zranění, udržuje koleno v teple, lze také použít na lýtka, stehna a paže k úlevě od bolesti svalů a pro pohodlné používání.

S ledovým obalem:

Kolenní zábal je doplněn síťovaným sáčkem pro studenou terapii. Pokud trpíte akutním podvrtnutím a jiným poraněním měkkých tkání, měli byste nejprve aplikovat studenou terapii ke snížení teploty, snížit rychlost metabolismu k dosažení proti zánětlivé a analgetické obrny a poté po 48 hodinách použít horkou terapii.

Poznámka: Ledový obklad není součástí balení.

Ovládání jedním tlačítkem a tři nastavení teploty:

Velmi snadné ovládání, můžete si sami ovládat teplotu a dobu ohřevu. Tlačítko napájení s LED indikátorem umožňuje nastavit červenou na nejvyšší, modrou na střední a zelenou na nejnižší teplotu. Krátkým stisknutím tlačítka pro změnu můžete změnit nastavení teploty.

Nastavitelné a drží na místě:

Konstrukce se dvěma rozdvojenými popruhy, zapínání na suchý zip.

Vyhřívací podložku lze omotat a uzamknout v jakékoli poloze nohy nebo paže, kde potřebujete tepelný obklad, už ji nemusíte držet v ruce.

Vyhřívací ortéza na koleno k dispozici pro více příležitostí:

Dodává se s napájením kabelem USB, lze ji zapojit do jakéhokoli zdroje napájení s portem USB, jako je powerbanka, počítač, notebook, stolní počítač a nabíječka do auta. Můžete si užívat teplo a prokrvení kolen při více příležitostech, ať už jdete, řídíte nebo pracujete v kanceláři.

Technické specifikace:

Nastavitelný

Zapínání na suchý zip

Široké využití

Měkký materiál

3 režimy vyhřívání

Rozměry: 52 cm x 21 cm

Rozměry kapsy: 15 cm x 14 cm

Napájení: USB DC 5V

První rychlostní stupeň (červené světlo), teplota je přibližně 44°C.

Druhý rychlostní stupeň (modré světlo), teplota je přibližně 41°C.

Třetí rychlostní stupeň (zelené světlo), teplota je přibližně 38°C.

Výstupní napětí adaptéru 8,5V/DC

První rychlostní stupeň (červené světlo), teplota je 56-65°C

Druhý rychlostní stupeň (modré světlo), teplota je 46-59°C

Třetí rychlostní stupeň (zelené světlo), teplota je 40-45°C

Poznámka: U různých měřících přístrojů a poloh měření může dojít k chybě 2-4°C.

Místo fyzioterapie: Koleno, stehno, hleň

Použitelná okolní teplota: -30°C až 15°C

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.