

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V242F Ramenní ortéza s vyhříváním 3 režimy vyhřívání USB

Popis:

Úleva od bolesti ramen: Vestavěná infračervená vyhřívací podložka na ramena podporuje krevní oběh a zmírňuje bolest způsobenou omrzlinami ramene, natržením rotátorové manžety, podvrtnutím, zánětem šlach, paralýzou, natažením, ztuhlosti a bolesti.

Teplotní režimy vyhřívání: Vyhřívací podložka na ramena se snadno ovládá. Vybavena napájecím kabelem USB. Nebo ji lze používat doma s adaptérem 5V/2A. Zapojte ji do zásuvky. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu sekund jej zapnete/vypnete. Krátkým stisknutím tlačítka přepnete režim.

Tato vyhřívací ramenní podložka je nastavitelná a lze ji nosit na obou ramenou. Popruh lze nastavit na délku, takže je ideální pro jakýkoli tvar postavy.

Automaticky se vypne, aby se zabránilo přehřátí.

Technické specifikace:

Nastavitelný

Zapínání na suchý zip

Široké využití

Měkký materiál

3 režimy vyhřívání

Rozměry: 52 cm x 21 cm

Rozměry kapsy: 15 cm x 14 cm

Napájení: USB DC 5V

Materiál: neopren

První rychlostní stupeň (červené světlo), teplota je přibližně 44°C.

Druhý rychlostní stupeň (modré světlo), teplota je přibližně 41°C.

Třetí rychlostní stupeň (zelené světlo), teplota je přibližně 38°C.

Výstupní napětí adaptéru 8,5V/DC

První rychlostní stupeň (červené světlo), teplota je 56-65°C


Druhý rychlostní stupeň (modré světlo), teplota je 46-59°C

Třetí rychlostní stupeň (zelené světlo), teplota je 40-45°C

Poznámka: U různých měřících přístrojů a poloh měření může dojít k chybě 2-4°C.

Místo fyzioterapie: Koleno, stehno, holeň, rameno

Použitelná okolní teplota: -30°C až 15°C

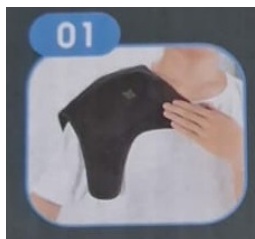

Připojte popruh k přezce na ortéze.


Jakmile je popruh na místě, nasadte si ortézu na rameno.




Vytáhněte dlouhý popruh zpod druhé paže, provlékněte ho přezkou a nyní jej vytáhněte z druhé strany přezky.



Zajistěte suchý zip a ujistěte se, že je pevně utažený.

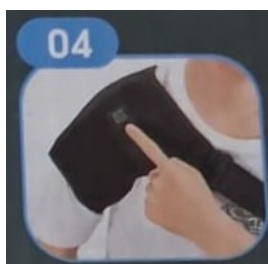

Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 5 sekund pro přepnutí režimu vyhřívání.

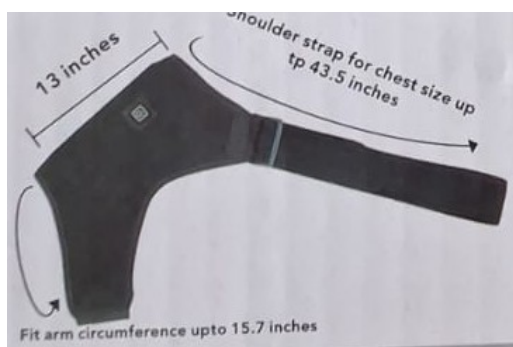

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.